

# \* \* 唾液採取・梱包発送手順書 \* \*

## 唾液採取手順

**注意事項**

運動などの直後ではなく、安静時の唾液を採取してください。  
 採取の30分前から、飲食・喫煙・うがい・歯磨き・マウスウォッシュなどは行わないでください。  
 採取の30分前に軽く口をすすぎ、清潔な場所で採取してください。  
 採取前に口紅やリップクリームは付けないでください。  
 採取直前に手を洗い、同封の手袋をしてから採取してください。(全ての梱包が終わるまで手袋は外さないで下さい)

<p>①</p> <p>ファネル コレクションチューブ</p>	<p>②</p>	<p>③</p> <p>不活性化剤</p>
<p>ファネルとコレクションチューブをひねりながら取り付けてください。                  ※コレクションチューブの内側には触れないでください。</p>	<p>口の中に唾液を溜め、ゆっくりと唾液をファネルの中に吐き出して下さい。これを数回繰返し、コレクションチューブの1mlまで採取してください。                  ※コレクションチューブの外に付着した物は拭き取ってください。                  ※必要量(1ml)がないと正確な結果が出ない場合があります。</p>	<p>不活性化剤のキャップを外し、唾液を採取したコレクションチューブに全て入れてください。                  ※<b>不活性化剤は絶対に口に入れないでください。</b>                  ※不活性化剤の容器は雑貨扱いですので、各市町村の指定に合わせて廃棄してください。</p>

<p>④</p>	<p>⑤</p>	<p>⑥</p> <p>検体袋 アルコールパッド</p>
<p>中の液体が漏れないようにファネルをひねりながら、コレクションチューブから取り外してください。                  ※外したファネルは雑貨扱いですので、各市町村の指定に合わせて廃棄してください。</p>	<p>コレクションチューブに赤色のキャップをひねりながらしっかりと閉め、5回ほど上下に混ぜてください。                  ※コレクションチューブの外に付着した物は拭き取ってください。</p>	<p>検体袋から容器シールを剥がし、コレクションチューブへしっかりと巻きつけて貼ってください。                  アルコールパッドでコレクションチューブを拭いてください。                  ※<b>氏名の記載を必ず確認してください。</b></p>

## 梱包発送手順

**注意事項**

しっかりと封をしてください。  
 必ず順番通りに梱包を行ってください。(A→B→C→D→E)  
 新型コロナウイルス以外の検査物を同封しないでください。  
 (他の検体を同封した場合、全ての検体を廃棄する場合があります)

<p>A</p> <p>検体袋</p>	<p>B</p> <p>吸収面 ビニール面 吸収材 緩衝材</p>	
<p>採取後のコレクションチューブを検体袋に入れ封をしてください。</p>	<p>検体袋を吸収材と重ね(吸収面の方を検体袋側へ)、緩衝材の中に入れ、巻いてください。その後、バイオ・パウチの中に入れてください。</p>	
<p>C</p>	<p>D</p> <p>バイオメラー(箱) Security seal</p>	<p>E</p> <p>依頼書 発送袋</p>
<p>バイオ・パウチの剥離紙を剥がし、入れ口を中心として粘着同士を貼り合わせます。                  ※しっかりと貼り合わせてください。</p>	<p>封をしたバイオ・パウチをバイオメラー(箱)に入れ、Security seal(セキュリティシール)で封をしてください。</p>	<p>バイオメラー(箱)と依頼書を発送袋に入れ、ゆうパック着払い伝票を貼り、発送してください。手袋を取って手を洗ってください。                  ※<b>注意事項・記入漏れがないか再度確認してから発送してください。</b></p>